

Orthopädische Schuheinlagen

Liebe Kundin
Lieber Kunde

Sie erhalten ihren Füßen individuell angepasste und fachmännisch gefertigte Schuheinlagen. Diese Gelegenheit benutzen wir, Ihnen ein paar **Hinweise** mit auf den Weg zu geben.

Während den ersten drei Wochen können Sie Muskelkater oder Gelenkschmerzen verspüren, weil Schuheinlagen Veränderungen in der Körperhaltung und Statik des ganzen Körpers bewirken. Während dieser Zeit darf die Schuheinlage als Fremdkörper empfunden werden, hingegen darf sie nicht direkt Schmerzen verursachen.

Nach einem Monat erwarten wir Sie zu einer Routinekontrolle. Sollten Sie vorher stärkere Beschwerden haben, so melden Sie sich bitte umgehend.

Hier noch einige **Pflegetipps**:

- ✓ Nehmen Sie die Schuheinlagen über Nacht zum Trocknen aus den Schuhen.
- ✓ Trocknen Sie die Schuheinlagen **nie** an der Sonne und **nie** auf der Heizung.
- ✓ Kunstlederdecksohlen können Sie mit einem in Seifenwasser benetzten Lappen reinigen oder mit entsprechendem Mittel desinfizieren.
- ✓ Sind Sie dauernd auf den Füßen, lohnt sich die Anschaffung eines zweiten Paares Schuheinlagen. Sie können dann die Paare abwechslungsweise tragen.
- ✓ Lassen Sie die Schuheinlagen jährlich von einem eidg. diplomierten Orthopädie-Schuhmacher-Meister **OSM** kontrollieren.

Wir wünschen Ihnen beschwerdefreies Gehen und stehen Ihnen bei Fragen oder Anliegen gerne zur Verfügung.

Ihr Brunner Schuhtechnik – Team denn wir haben Ideen für Gesundes Gehen



ORTHOBRUNNER
SCHUHTECHNIK
Crispin Brunner eidg. dipl. Orthopädie-Schuhmacher-Meister
Hauptstrasse 36 6260 Reiden
Fax 062 758 12 08 Tel. 062 758 12 64
Spezialatelier > Fussorthopädie > Schuhverkauf > Schuhreparaturen

Montag und Dienstag geschlossen
Mi bis Fr: 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samstag: 8.00-12.00 / 13.30-16.00
Lieferant der IV, SUVA, MV, KK